


単4電池使用

- フタを開けて、アルカリ単4電池(1.5V)を中に入れて下さい。
次に、本体に電源キーを接続し、照射口を取り付けて下さい。

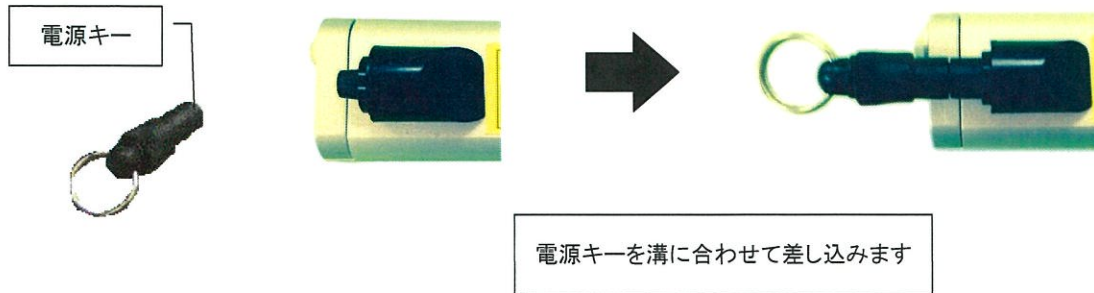

安全上のご注意

- ⚠ 添付文書のその他の注意事項で機器を使用しないときは電源キーを取り外し適切に保管することとなっておりますが、4ピンが緩んで接触不良を起こすことがありますので電源キーの取り外しは、できるだけしないようお願い致します。

ACアダプタ使用

- 本体にACアダプタを接続し、照射口を取り付けて下さい。(コードの長さは、180cmです)電源コードをコンセントに接続して下さい。

安全上のご注意

- ⚠ 単4電池は、本体の中に入れておかないで下さい。ACアダプタと同時に使用すると、電圧の関係で作動しなくなりますのでご注意下さい。
- ⚠ プラグをつけたりはずしたりすると、接触不良を起こしやすくなりますので装着したままの状態を保管して頂けます様、お願い致します。
- ⚠ 停電のときは直ちに電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

